



Johanna Lethin Jacobson
Ambassadör för välfärdsteknik

Välkommen!

Information om mobila
trygghetslarm (GPS-larm).

A photograph of an elderly man with a joyful expression, wearing a wide-brimmed straw hat and a blue long-sleeved shirt. He is reclining in a white hammock, waving his right hand and holding a white envelope or document in his left. A grey wristwatch is visible on his left wrist. The background is a soft-focus outdoor scene with green foliage and a building. The text "2007 började Posifons resa med att erbjuda välfärdsteknik" is overlaid in the bottom right corner in a dark blue, sans-serif font.

2007 började Posifons
resa med att erbjuda
välfärdsteknik

Hur funkar egentligen GPS?



Nu ska vi prata om trygghetslarm



I Krokoms kommun är 50% av trygghetslarmen GPS

Krokoms kommun erbjuder två typer av trygghetslarm: GPS-larm och ett fast inkopplat trygghetslarm.

- Ett GPS-larm ser ut precis som en klocka och bärs på handleden. Eftersom larmet har en GPS-mottagare fungerar det var du än är. Om du till exempel ramlar när du är ute på promenad kan du trycka på larmknappen och larma hemtjänstpersonalen. De kan då prata med dig och se exakt var du befinner dig. Med ett GPS-larm kan du fortsätta att röra dig fritt, samtidigt som du kan vara trygg i att du får hjälp om olyckan är framme.
- Ett fast inkopplat trygghetslarm fungerar bara i bostaden och cirka tjugo meter runt fastigheten. Du larmar med larmknapp som du bär runt handleden eller runt halsen...



**Krokoms
kommun**
KROKOMEN TJÆLTE

Trygghetsteknik

Det är viktigt att känna sig trygg i sitt eget hem. Ett trygghetslarm är ett exempel på ett hjälpmedel bland många andra som du kan ansöka om.

Ibland används begreppet välfärdsteknik om de tekniska lösningar som kompletterar hjälpmedel för äldre och andra som behöver stöd för att klara sin vardag. Vi vill i stället använda begreppet trygghetsteknik eftersom vi tycker att det är en bättre beskrivning av vad det handlar om. Trygghet är en känsla och ett tillstånd som vi känner inom oss, ett välbefinnande.

**För
vem?**




posifon

Mobila trygghetslarm

- Trygghet
- Självständighet
- Säkerhet
- Aktivitetsnivå
- Delaktighet
- Fungerar inom- och/eller utomhus.
- Ledsagning eller promenad
- Försämrade orienteringsförmåga
- Kognitiv svikt/nedsatt beslutsförmåga

Tre exempel på trygghetsområde

Definierat geografiskt område där personen vanligtvis rör sig.

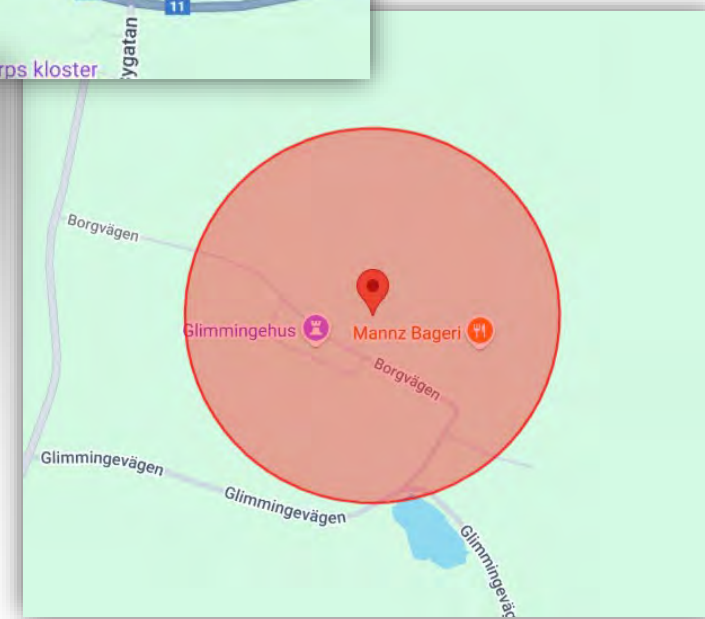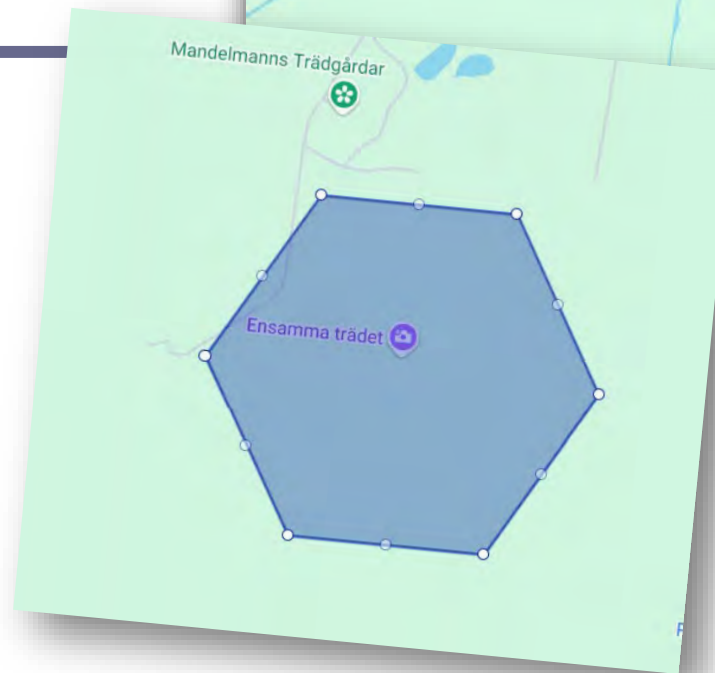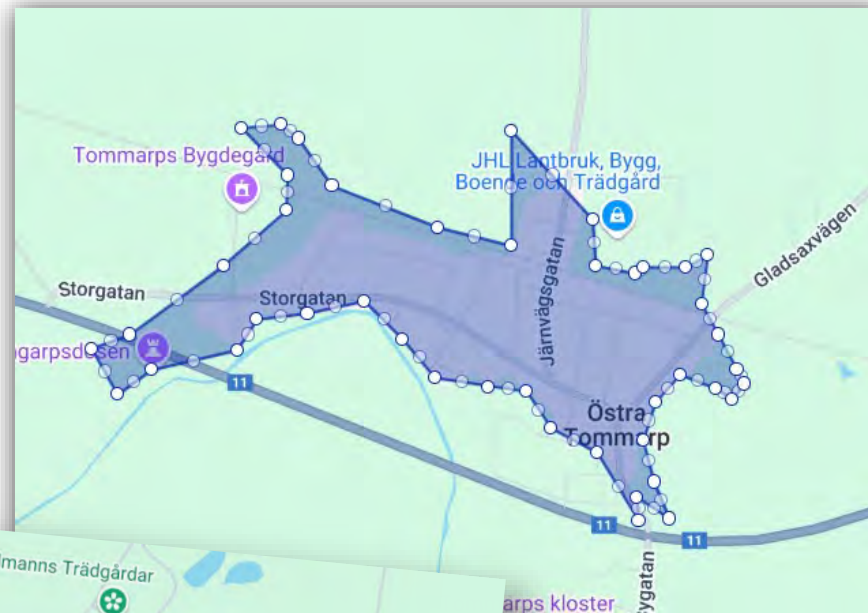

Posifon SmartSole





Posifon Pico Pro

- Aktivt och passivt larm
- IP67
- Tvåvägskommunikation
- Mobilnät: 4G, 3G, 2G
- Inomhuspositionering via Wifi
- Bärs som standard i ficka
- Flera fästmöjligheter:
 - Halsband
 - Runt handleden
 - Karbinhake
 - Bältesclips
 - I väska
- Fallsensor
- IMEI-nummer på etikett placerad på enhetens baksida
- Kund kan styra GPS-position i PosifonCare, kortast intervall är 1 position per minut. Standardvärde är var tredje minut.





Posifon Nano 4G

- Aktivt och passivt larm
- IP67
- Tvåvägskommunikation
- Mobilnät: 4G
- Inomhuspositionering via Wifi
- Fallsensor
- Flera fästmöjligheter
- Bärs som armbandsur eller i ficka. Låsbart armband finns.
- QR-kod på etikett med IMEI-nummer på enheten sida
- Kund kan styra intervall från 1 position per minut eller längre. Standardvärde är var tredje minut.



Posifon Active



Posifon Active




- Aktivt och passivt larm
- IP67
- Tvåvägskommunikation
- Mobilnät: 4G
- Bärs som klocka på handleden
- Inomhuspositionering via WiFi
- Fallsensor
- Valbar urtavla: 9 olika designer. Analog eller digital
- Förutom tid visas;
 - Stegräknare
 - Batterinivå
 - Signalstyrka
 - Veckodag och datum
- IMEI-nummer lasergraverat på enhetens baksida
- Kund kan själv styra hur ofta position ska tas. Från 1 position per minut, standard är var femte minut.



Flera olika urtavlor till Posifon Active













Digitala:

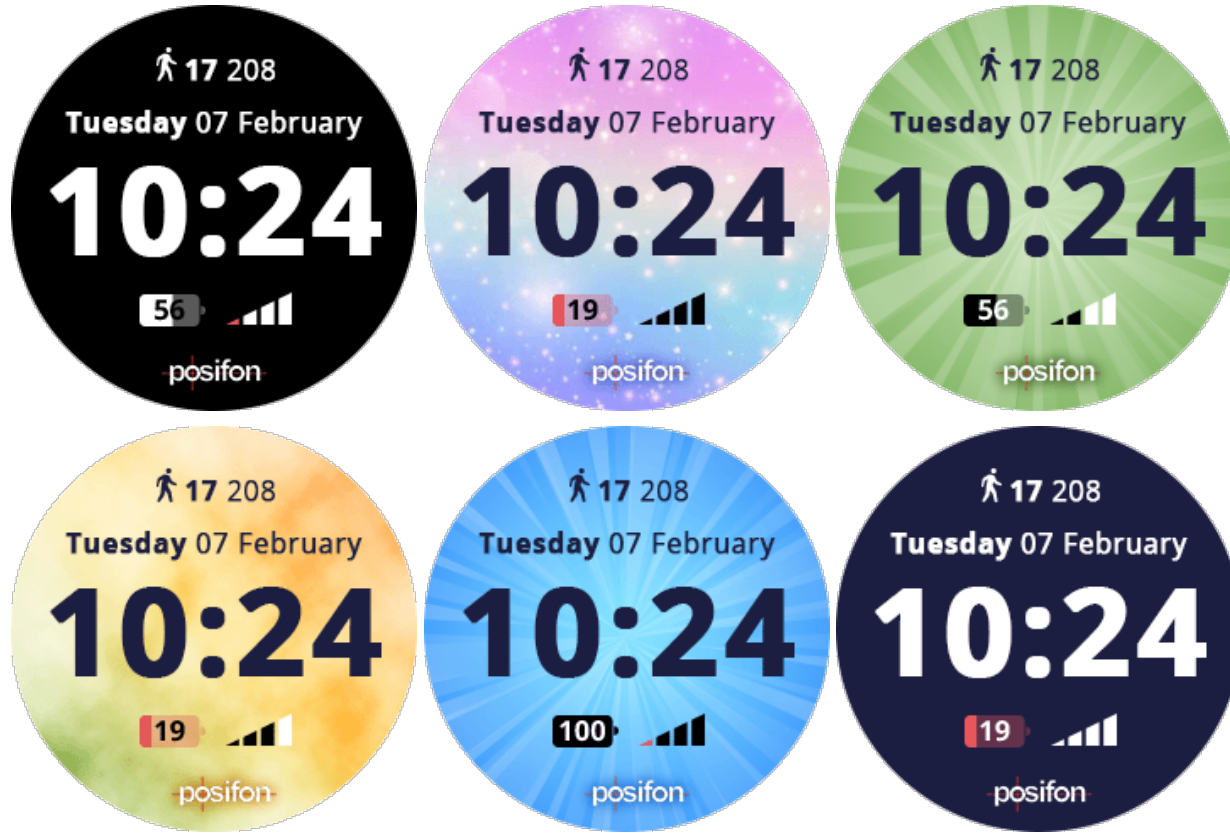

Analoga:



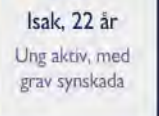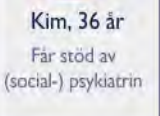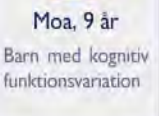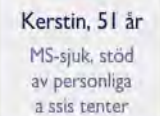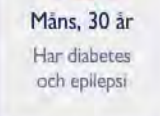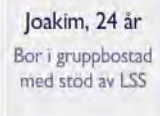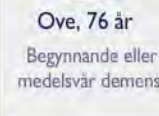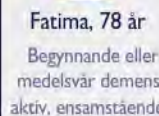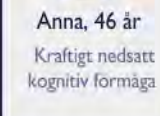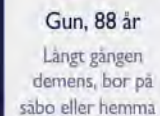

Isak, 22 år
Ung aktiv, med
grav synskada

Självständighet

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Larmknapp	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ringa	1	1	2	2	2	1	2	2	1	2	1	2
Svara automatiskt	1	1	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1
Trygghetsområde	2	2	2	2	2	3	3	3	3	1	3	3
Hemma zon	2	2	1	1	1	3	3	3	3	1	3	3
Sökning av en persons lokalisering	2	2	2	2	2	1	1	1	3	1	1	3
Larm vid lågt batteri m.m	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Fall- eller annan sensor	2	2	2	2	2	2	3	1	3	1	3	3

Kommunikation

Under 2025 kommer 2G och 3G att släckas ned. *Är du redo?*



Modell:	SmartSole 4G 	Zembro 4G 	Pico Pro 4G 	Nano 4G 	Active 4G 
Batteritid standby:	10 dygn	1-2 dygn	7 dygn	5 dygn	5 dygn
Batteritid normal-användning och trygghetsområde:	1-4 dygn	1-2 dygn	2-3 dygn	1-2 dygn	2-5 dygn
Larmknapp:	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Tvåvägskommunikation:	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Fallarm:	Nej	Nej (på gång)	Ja	Ja	Ja
Vatten – och dammtäthet:	IP67	IP68	IP67	IP67	IP67
Inomhuspositionering:	Ja (Wifi)	Ja (BLE)	Ja (Wifi och BLE)	Ja (Wifi)	Ja (Wifi)
Laddning:	Induktion	Laddstation	Kabel med magnetkontakt, laddstation	Kabel med magnetkontakt	Kabel med magnetkontakt. laddplatta
Design/sätt att bära:	Sula i sko (ett par), olika storlekar.	Klocka	Bälte, halsrem, karbinhake, väska.	Klocka, eller på valfritt sätt	Klocka, eller på valfritt sätt
Uppdateringsintervall i (min):	1-10	1-2	0,5 -	0,5 -	1 -
Laddtid (från 0-100%):	4 h	1 h	2 h	2 h	4 h
Antal trygghetszon:	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat	Obegränsat



johanna.lethin.jacobson@posifon.se

Tack! Frågor?

Trygg, fri och aktiv.
Både hemma och ute.