

**PHONIRO
LARMSYSTEM**

Ökad frihet för många äldre

Utökad integration av GPS-larm i Senior Living-appen

Många verksamheter uppskattar den integration som Phoniro har med Posifons GPS-larm, eller som det även kallas, mobila trygghetslarm. Nu har vi gjort integrationen ännu mer kraftfull när även larm med indikering på karta kan visas i Senior Living-appen.

Mobila trygghetslarm är något som många användare upplever skapar trygghet och självständighet. Genom att använda en enhet som kopplar upp sig mot GPS-nätet så kan de som tidigare har varit oroliga för att "gå bort sig", nu känna tryggheten i att någon kan hitta dem även när de är utomhus. Ett tryck på knappen är allt som behövs.

I Senior Living-appen syns inte bara när larmet utlöses, utan även uppdateringar av positionen visas i realtid. På så sätt kan den som bär larmet enkelt hittas. Enheter som innehåller falllarm kan även skicka signaler om detta, vilket gör att både aktiva och passiva larm skickas till Senior Living-appen.

Studier gjorda på mobila trygghetslarm visar på stora nyttoeffekter för både användare, personal och anhöriga.

ENKELT

Genom integrationen med Phoniro Care så kan larm från Posifons mobila trygghetslarm nu visas i Senior Living appen även med kartbild

TRYGGT


Hyresgäster på särskilda boenden kan känna sig friare att röra sig utomhus med vetskapen att personalen bara är ett larmtryck bort

SÄKERT

Markera ett geografiskt område som bäraren av det mobila trygghetslarmet har tillåtelse att röra sig inom. Vid avvikelse skickas ett automatiskt larm till personalen.

Hur ser det ut i appen?

1

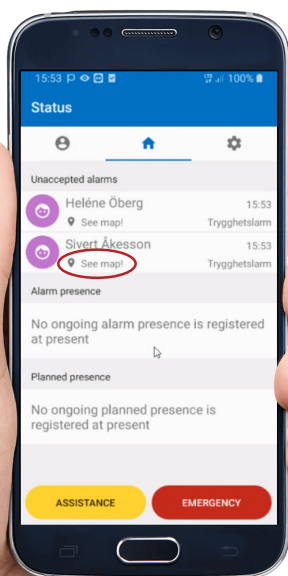

När ett larm tagits emot från en Posifon-enhet så syns det som vanligt i Senior Living-appen. Här kan du klicka på "Se karta".

Vanliga frågor?

Vilka tillbehör kan man använda?

Vi har stöd för många GPS-larm från Posifon. Längst ner på denna sida ser du vilka.

Måste jag använda både Phoniro Care och Posifon Care?

All användarinformation hanteras som vanligt i Phoniro Care. Men viss administration som är kopplad till Posifons produkter behöver du göra i Posifon Care.


Vilka typer av larm kan upptäckas och skickas till Senior Living-appen?

Både passiva larm (fallarm och trygghetsområdeslarm) och aktiva larm (att användaren trycker på larmknappen) som skickas från Posifons system kan tas emot i Senior Living-appen.

Hur gör jag för att komma igång?


Kontakta din distriktssäljare eller vårt Servicecenter så hjälper vi dig!

2

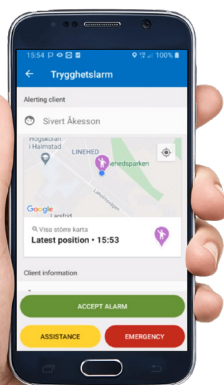


Detta öppnar upp en översiktskarta tillsammans med övrig information om var användaren befinner sig.

3

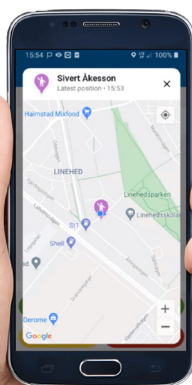

Du kan även få upp en större karta för att få ännu bättre översikt.

4

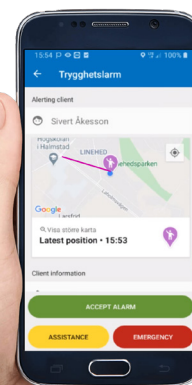

Om användaren flyttar på sig uppdateras positionen i appen och du kan se åt vilket håll användaren rör sig.

Aktiva GPS-larm:



Active



MiniFinder Pico



MiniFinder Nano



Zembro

Passivt GPS-larm:



SmartSole